

InBody270



Une grande précision pour une solution flexible



Moderne

Design ergonomique
pour un rythme de
travail efficace

Fiable

Performance fiable
et prouvée

Standard

L'archétype du test de
composition
corporelle

Feuille de Résultats

Les paramètres à droite de la feuille de résultats peuvent être affichés en option, en fonction des besoins du client. Vous pouvez sélectionner et imprimer une évaluation nutritionnelle, une évaluation de la balance corporelle, le tour de taille et, les données de pression sanguine en plus des données affichées dans la feuille de résultats.

1 Analyse de la composition corporelle

Le poids du corps est la somme totale de l'eau corporelle, des protéines, des minéraux et de la masse grasse corporelle. Maintenir une composition corporelle équilibrée pour rester en bonne santé

2 Analyse Muscle - Graisse

Comparer la longueur de la barre de la masse musculaire du squelette, avec celle de la masse grasse du corps. Plus la barre de la masse musculaire squelettique est longue comparée à la barre de la masse grasse, plus le corps est fort.

3 Bilan morphologique

L'IMC (Indice de Masse Corporelle) est un indice utilisé pour déterminer l'obésité en utilisant la taille et le poids. Le TGC (Taux de Graisse Corporelle) est le pourcentage de la graisse corporelle comparé au poids du corps.

4 Analyse segmentaire de la masse grasse maigre

L'analyse segmentaire de la masse maigre, montre pour chaque partie du corps à quel point un muscle est bien développé par rapport à cette partie du corps. Vous pouvez voir, quel muscle vous devez travailler plus que les autres.

5 Analyse segmentaire de la masse grasse

Vous pouvez vérifier et gérer la masse grasse de chaque partie du corps de manière segmentée. Contrôler le pourcentage de la masse grasse corporelle de chaque partie de votre corps et essayer de la conserver à un taux normal

6 Historique de la composition corporelle

Tracer l'historique du suivi de votre composition corporelle en masse musculaire et masse grasse

InBody

ID sample (sample)	Taille	Sexe	Date / Heure du test
	180cm	Homme	21.04.2016. 12:11

7 Score InBody

1 Analyse de composition corporelle

Quantité d'eau totale dans le corps	Eau corporelle totale	47,3 (39,1-47,7)
Pour la masse musculaire	Protéines	12,8 (10,4-12,8)
Pour des os solides	Minéraux	4,68 (3,62-4,42)
Pour stocker l'énergie	Masse grasse	13,4 (8,3-16,6)
Spécifie	Poids	78,2 (59,1-78,9)

2 Analyse muscle-graisse



3 Bilan morphologique


IMC (Indice de Masse Corporelle)	24,8
TGC (%)	17,2

4 Analyse segmentaire de la masse maigre

5 Analyse segmentaire de la masse grasse



6 Historique de la composition corporelle

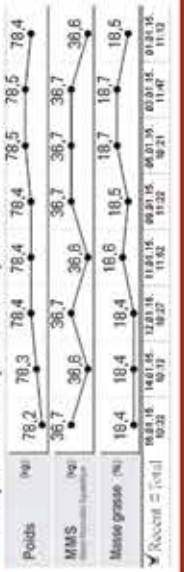

7 Score InBody

Ce score montre l'évolution de la composition de votre corps incluant les muscles, la graisse et l'eau dans le corps

8 Contrôle du poids

Il vous permet de voir toutes les mesures de votre corps, votre taille, votre masse musculaire et masse grasse corporelle et, savoir si ces mesures correspondent à la normalité. Le + signifie que vous devez prendre du poids et le - que vous devez en perdre

9 Bilan morphologique

Évaluer la morphologie en se basant sur l'IMC et le pourcentage de masse grasse

10 Rapport Taille-Hanche

Le rapport taille-hanche est le ratio du tour de taille par rapport au tour de hanche

11 Niveau de Graisse

Le niveau de graisse viscérale est un indicateur basé sur la surface estimée de graisse entourant les organes internes de l'abdomen.

12 Paramètres de recherche

De nombreux aspects nutritionnels sont indiqués dans les paramètres de recherches, tels que la masse non grasse, le métabolisme de base (le nombre minimum de calories recommandées par jour), le degré d'obésité. Pour obtenir une liste complète de l'interprétation, veuillez scanner le QR Code

13 Impédances

Les courants électriques sont appliqués sur tout le corps. L'impédance est la valeur de résistance des tissus mesurés lorsque l'is sont traversés par un courant. L'impédance est aussi utilisée à de nombreuses fins dans le domaine de la recherche.

Feuille de résultats enfant

Une feuille de résultats tout spécialement conçue avec un graphique d'évolution est disponible pour les enfants.

InBody

IMC	24,8
TGC	17,2
MMS	36,6
Masse grasse	13,4
Poids	78,2
IMC	24,8
TGC	17,2
MMS	36,6
Masse grasse	13,4
Poids	78,2

